

## Bowie & Dick Helix Test



## Bowie & Dick Helix Test



Der stericlin® Bowie & Dick Helix Test überprüft Ihren Sterilisator objektiv auf Luftentfernung und Dampfdurchdringung. Nur bei ausreichenden Bedingungen wird ein korrekter Farbumschlag angezeigt. Fehler dagegen werden kompromisslos offengelegt.

Mit der korrekten Funktionsfähigkeit des Sterilisators steht und fällt das Arbeitsergebnis in der ZSVA. Eine Funktionsstörung des Sterilisators kann unabsehbare Folgen haben. Der tägliche Test hat eine entscheidende Bedeutung in der Funktionskontrolle und Qualitätssicherung.

Einfach den Indikatorstreifen in der Kapsel platzieren und die Kapsel auf den Prüfkörper schrauben, B & D-Programm Ihres Sterilisators durchführen, Streifen entnehmen und Ergebnis überprüfen.

Der Bowie & Dick Helix Test entspricht den Anforderungen der ISO 11140-4. Die Erfüllung der Leistungsanforderungen wird bei VP mit einem hochpräzisen Sterilisator für Prüzzwecke sichergestellt. Wir garantieren deshalb Normkonformität und absolute Konstanz dieses Produkts.

Die Indikatorfarbe auf dem Streifen schlägt von blau nach pink um und enthält keinerlei Schwermetalle. Nach erfolgreichem Umschlag verändert sich der Farbton des Indikators nicht mehr. Sie haben absolute Dokumentationssicherheit und langfristige Verlässlichkeit der Ergebnisanzeige.

**Vereingte Papierwarenfabriken GmbH**

Industriestraße 6 · D-91555 Feuchtwangen  
Tel +49 (0) 9852 901-189 · Fax +49 (0) 9852 901-77104  
stericlin@vp-group.de · www.vp-group.de

