




Tear Touch Blu - Schirmertest Diagnosestreifen

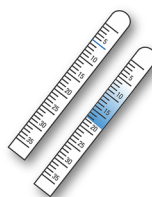

Mit diesem Diagnosestreifen wird die Menge der Tränenproduktion objektiv gemessen:

- Patient blickt nach oben
- Umklappen der runden Spitze des Teststreifens
- Einhängen des Teststreifens in den unteren Bindehautsack
- 5 Minuten abwarten
- Befeuchtete Strecke in mm anhand der aufgedruckte Skala mit Indikator-Farbstoff ablesen.
- Bei ca. 15 mm Einfeuchtung wird von einer ausreichenden Tränenproduktion ausgegangen.

Material	Whatman-Filterpapier Nr. 41 mit Indikator-Farbstoff
Besonderheiten	• Jeder Streifen mit Aufdruck mm-Skala mit Indikatorfarbstoff • Zum Vergleich der Ergebnisse vor und nach der Behandlung kann der Streifen aufbewahrt werden • Streifen einzeln steril verpackt • Innovativer Peel-Open-Verpackungsbeutel • Lange Sterilität von 5 Jahren ab Produktionsdatum
Hersteller: Madhu Instruments	1 VPE (100 Streifen)  STERILE Tear Touch Blu Indikator Art. MIPL/A6/W2O 10046334