

Bowie & Dick 1x Testpaket



Bowie & Dick 1x Testpaket



Mit der korrekten Funktionsfähigkeit des Sterilisators steht und fällt das Arbeitsergebnis in der zentralen Sterilgutversorgung. Der steriGLIN® Bowie & Dick 1x Test ermöglicht die tägliche Funktionskontrolle und Qualitätssicherung des Sterilisators.

Die einfache Handhabung überzeugt: Testpaket im Sterilisator platzieren, Bowie & Dick-Programm durchführen, Testbogen entnehmen, Ergebnis überprüfen, fertig. Der Indikator auf dem innen liegenden Testbogen schlägt von blau nach pink um und enthält keinerlei Schwermetalle. Nach erfolgtem Umschlag verändert sich der Farbton des Indikators nicht mehr – daraus ergibt sich absolute Dokumentationssicherheit.

BSI Kitemark™-Prüfsiegel für das steriGLIN® Bowie & Dick 1x Testpaket

Das steriGLIN® 1x Testpaket zur Durchführung des täglichen Bowie & Dick-Tests bei Dampfsterilisatoren hat das renommierte Kitemark-Prüfsiegel des British Standard Institute (BSI) erhalten. Damit wird die Übereinstimmung des Produkts mit den strengen Normanforderungen der DIN EN ISO 11140-4 von einem international anerkannten, unabhängigen Prüfinstitut bestätigt. Von einem Prüfmittel wie dem steriGLIN® Bowie & Dick 1x Testpaket darf und muss absolut normkonforme Qualität und die Erfüllung der ISO 11140-4 erwartet werden. Dies kann nur in einem speziell ausgerüsteten Sterilisator geprüft werden, wie er im Entwicklungslaboratorium der VP eingesetzt wird. Von dieser Voraussetzung für die Prüfung sowie von deren korrekter Durchführung haben sich die Prüfer des BSI vor Ort persönlich überzeugt.

Das Kitemark des BSI ist eines der ältesten Gütesiegel überhaupt und zeichnet unter strengsten Auflagen insbesondere solche Produkte und Dienstleistungen aus, bei denen das Thema Sicherheit eine maßgebliche Rolle spielt.

a member of the vp-group.de

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH

Industriestraße 6 · D-91555 Feuchtwangen
Fon +49 (0) 9852 901-189 · Fax +49 (0) 9852 901-77104
steriGLIN@vp-group.de · www.vp-group.de

