



Fluoro Touch - Fluorescein Teststreifen



Mit diesen Diagnosestreifen lassen sich durch die Anfärbung von Bereichen mit Zelldefekten Defekte oder Abschürfungen des Hornhautepithels visualisieren.

Weitere Indikationen zur Anwendung:

- Nützlich für die Beurteilung der Anpassung harter Kontaktlinsen
- Applanationstonometrie
- Bewertung der Tränenfilmauflösungszeit
- Zur Visualisierung von Defekten des Hornhautepithels

Material	• Whatman-Filterpapier Nr. 1 mit runder, stumpfer Spitze, imprägniert mit 1,0 mg Fluorescein-Natrium • Eingebettet zwischen Papierstäbchen (Gesamtlänge 60 mm)
Anwendung	• Prüfen Unversehrtheit Verpackung zur Sterilitätssicherung • Imprägnierte, farbige Spitze mit ein oder zwei Tropfen steriler Spül- oder Kochsalzlösung für volle Fluoreszenz und Patientenkomfort anfeuchten • Bindehaut oder Fornix Conjunctivae mit angefeuchteter Spitze berühren • Empfehlung: Patient nach Anwendung einige Male blinzeln
Besonderheiten	• Streifen einzeln steril verpackt • Innovativer Peel-Open-Verpackungsbeutel • Lange Sterilität von 5 Jahren ab Produktionsdatum
Hersteller: Madhu Instruments	1 VPE (100 Streifen) Fluoro Touch Art. MIPL/A4/W2O 10046335  STERILE

Für die tägliche Praxis